

一次性使用采样器使用说明书

【产品名称】

通用名称：一次性使用采样器

【型号规格】

型号	适用部位	手柄长度 (mm)	采样头长度 (mm)	折断点距手柄顶 端距离 (mm)	包装规格
SWN01	口腔	150±3mm	16±3mm	30±3mm	1支/包；100支/盒 5000支/箱；6000支/箱
SWN02	口腔	150±3mm	16±3mm	76±3mm	1支/包；100支/盒 5000支/箱；6000支/箱
SWN03	鼻腔	150±3mm	20±3mm	80±3mm	1支/包；100支/盒 5000支/箱；6000支/箱
SWN08	鼻腔	90±3mm	20±3mm	50±3mm	1支/包；200支/盒 5000支/箱；6000支/箱
SWN04	口腔	150±3mm	16±3mm	20±3mm	1支/包；100支/盒 5000支/箱；6000支/箱
SWN05	口腔	150±3mm	16±3mm	/	1支/包；100支/盒 5000支/箱；6000支/箱
SWN06	宫颈	170±3mm	20±3mm	50±3mm	1支/包；100支/盒 5000支/箱；6000支/箱
SWN07	宫颈	170±3mm	20±3mm	90±3mm	1支/包；100支/盒 5000支/箱；6000支/箱

【预期用途】

本产品用于样本的收集。

【结构组成】

产品由拭子杆和采样头组成，非无菌提供。

【储存条件及有效期】

储存条件：包装后的产品应贮存在 2 ~30℃，无腐蚀性气体、通风良好、阴凉干燥、清洁的环境中。

有效期：36个月

【生产日期及失效日期】

见外包装

【使用方法】

- 握住拭子杆轻轻将采样拭子插入采样部位黏膜处。
- 轻轻旋转采样拭子 3-5 圈，然后慢慢取出。

3. 将采完的拭子放入样本保存管内，折断拭子杆，随即密封保存即完成采样。

【禁忌症】

本产品对皮肤及黏膜无刺激，无禁忌症。

【注意事项】

1. 使用时应注意包装标志，要检查包装是否破损，如破损，则严禁使用。
2. 本产品为一次性使用产品，不能重复使用。
3. 使用时，注意产品失效期，过期产品严禁使用。
4. 采样后及时将样本置于样本保存管内，避免与其它材料和挥发性化学气体接触，并及时送检。
5. 使用后按医疗废弃物相关规定处理。

【标签所用图形、符合、缩写解释】



禁止二次使用



包装破损请勿使用



储存条件



查阅使用说明



产品型号



生产批号



生产日期



失效日期

【基本信息】

备案人/生产企业：简石生物技术（浙江）有限公司

住所/生产地址：浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 36 号 11 幢

网 址：www.jianshibio.com

售后服务单位名称：简石生物技术（浙江）有限公司

联系方式：010-58235382

【医疗器械生产备案凭证编号】浙甬食药监械生产备 20220001 号

【医疗器械备案凭证编号/产品技术要求编号】浙甬械备 20220112 号

【说明书核准及修改日期】2022 年 6 月 15 日