

## 一次性使用无菌采样拭子 说明书

### 【产品名称】

一次性使用无菌采样拭子

### 【型号规格】

型号	适用部位	拭子长度	采样头长度	折断点距采样头顶端距离
SW01	口腔	150±3mm	16±3mm	30±3mm
SW02	口腔	150±3mm	16±3mm	76±3mm
SW03	鼻腔	150±3mm	20±3mm	80±3mm
SW08	鼻腔	90±3mm	20±3mm	50±3mm
SW04	口腔	150±3mm	16±3mm	20±3mm
SW05	口腔	150±3mm	16±3mm	/
SW06	宫颈	170±3mm	20±3mm	50±3mm
SW07	宫颈	170±3mm	20±3mm	90±3mm
SW09	宫颈	150±3mm	20±3mm	50±3mm
SW10	宫颈	150±3mm	20±3mm	90±3mm

### 【适用范围】

一次性使用无菌拭子供人体自然腔道，如鼻腔、口腔、宫颈部位沾取生物样本检验用。

### 【组成成分】

产品由拭子杆和采样头组成，无菌提供。

### 【储存条件】

产品应在室温贮存，无腐蚀性气体、通风良好、阴凉干燥、清洁的环境中。

### 【产品性能】

经辐照灭菌，产品应无菌。

### 【使用方法】

1、带折断点产品使用方法如下：

- 1.1 打开包装，取出拭子（注意：不要触碰到采样头），然后用无菌拭子进行采样。
- 1.2 采样头接触到采样部位后，轻轻旋转 3-5 圈，以采集到足够的样本，然后慢慢取出。
- 1.3 将采完的拭子放入采样装置中，从折断点处折断拭子杆，随即密封保存。

2、无折断点产品使用方法如下：

- 2.1 打开包装，取出拭子（注意：不要触碰到采样头），然后用无菌拭子进行采样。
- 2.2 采样头接触到采样部位后，轻轻旋转 3-5 圈，以采集到足够的样本，然后慢慢取出

2.3 将采完的拭子放入采样装置中，随即密封保存即完成采样。

**【使用期限】** 36 个月。

**【生产日期及失效日期】** 见外包装。

**【禁忌症】** 对植绒过敏者慎用。

**【注意事项】**

1. 使用时应注意包装标志，要检查包装是否破损，如破损，则严禁使用。
2. 本产品为一次性使用产品，不能重复使用。
3. 使用时，注意产品失效期，过期产品严禁使用。
4. 采样后及时将样本置于采样装置中，避免与其它材料和挥发性化学气体接触，并及时送检。
5. 使用后按医疗废弃物相关规定处理。

**【标签所用图形、符号、缩写解释】**



禁止二次使用



包装破损请勿使用



储存条件




查阅使用说明



产品型号



生产批号

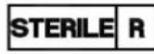

辐照灭菌



生产日期



失效日期

**【基本信息】**

注册人/生产企业：简石生物技术（浙江）有限公司

住 所：浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 36 号 11 幢

生产地址：浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 36 号 11 幢

网 址：[www.jianshibio.com](http://www.jianshibio.com)

**【医疗器械生产许可证编号】**

**【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】**

**【说明书核准及修改日期】** 2023 年 2 月 8 日

产品包装标签样稿：

